


STERILOINTIASTIA

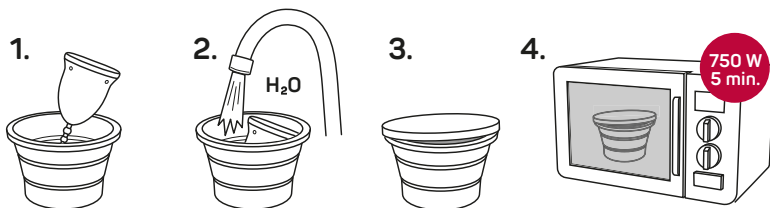

1. Laita kuukuppi sterilointiastiaan.
2. Täytä $\frac{3}{4}$ astiasta puhtaalla vedellä.
3. Sulje kansi niin, että se jää hieman raolleen.
4. Laita astia mikroaaltouuniin 3–5 minuutiksi tai niin pitkäksi aikaa, että vesi alkaa kiehua.

Valmistusaine: lääketieteellinen silikoni

nomaicup.com

nomai

Nomai Oy, Rönöntie 3 C
70100 Kuopio, Finland
044 540 2648
www.nomaicup.com